

YOSHIDA

Q

インスツルメントの
注油の正しい頻度は
ご存知ですか？

正しい**注油**で
インスツルメントの
POWERを持続

ハンドピース自動注油システム

FRESH CARE **PLUS**

フレッシュケア プラス仕様

- 装着本数…ハンドピース4本
- 注油時間…タービン：15秒
マイクロモーターハンドピース：min 85秒（ライトモード）
min 145秒（ヘビーモード）

- 供給エア圧力…0.4～0.6Mpa
- 付属品カップリング…マイクロモーターハンドピース用2個、チャック用ノズル1個
- オイルタンク容量…500mL（タンク毎交換）

- 電源電圧…100VAC～240VAC 50/60Hz
- 消費電力…30VA
- 寸法…W280×D275×H308mm
- 質量…5.5kg

オプション・別売品

- オイルボトル 500mL
- タービン用アダプター（ST）
- マイクロモーターハンドピース用アダプター
- エアースケーラー用アダプター（LUX）
- エアースケーラー用アダプター（ST）

Distributor

YOSHIDA

THE YOSHIDA DENTAL MFG. CO., LTD.

Address 1-3-6 Kotobashi, Sumida-ku Tokyo, Japan ZIP 130-8516
TEL +81-3-3631-2165 FAX +81-3-3631-2685 (International Business Div.)

A. 患者さんごと、
滅菌前の**注油**です。



毎秒40万の高速回転をするタービンは、汚れが溜まっていたり、
確実な注油がなければ、回転不良やカートリッジを消耗させます。

患者さんごとの、滅菌前の確実な注油で
カートリッジをながくお使いいただけます。

洗浄

使用済み
ハンドピースの
汚れを落とす

注油

オイルをチャック部
ノズル部から隅々
まで注油

滅菌

ハンドピースを
滅菌

保管

滅菌パックの
まま保管

FRESH CARE **PLUS**

最短 **15秒!**
タービン1本



ハンドピースのトラブル予防に、 自動注油システムで簡単・確実なメンテナンス。

ハンドピースを同時に4本セット可能

付属品カップリング

マイクロモーターハンドピース用2個、チャック用ノズル1個
別売りで、付け替えのできるアタッチメントもご用意。



オイルボトル



オイルボトル1本で、約1300本分の
インスツルメントの注油ができます。
スプレーボトルの1/4以下のコスト
で、確実に注油をします。

チャック用ノズル

付属のチャック清掃ノズルを使用(手動)し、
チャック内部の汚れや摩耗粉を除去できます。

オイル飛散防止 フィルター

注油オイルの飛散を軽減します。



FRESH CARE **PLUS**

シンプル操作

STEP
1



チャックを清掃。

STEP
2



ハンドピースをセットし扉を閉める。

STEP
3



セレクトボタンで、注油するハンドピースと
モードを選んで、スタートボタンを押す。
オイルとエア圧力で隅々まで注油完了。

注油時間(1本あたり)

エアータービンハンドピース : 15秒

マイクロモーターハンドピース : min85秒(ライトモード)

min145秒(ヘビーモード)