



# 輕量。

僅130g（與JUSTY 3相比，約減輕30%）

# 輕巧。

寬73mm x 深84mm x 高90mm（與JUSTY 3相比，約縮小30%）

# 易操作。

不佔用醫師檯面空間，輕鬆移動、方便拿取。



掃描認識更多關於JUSTY 3.5的資訊



輕壓主機前方的面板即可開啟電源，準備開始測量！



1

插入根管銼針

將根管銼針插入根管，儀表指示會同步運動。

2



靠近根尖

靠近根尖時，以綠色刻度燈及陣陣聲提醒。



3

確認穿透根尖

超過根尖的距離以3階段表示，方便您挑選根管擴大針。

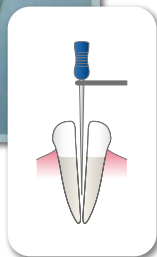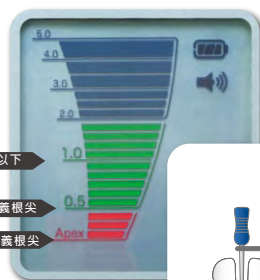

1mm以下  
生理學定義根尖  
解剖學定義根尖

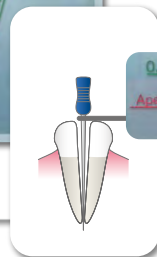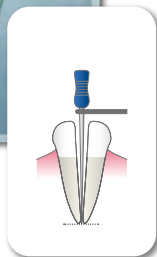

根尖穿透的確認以0.15mm為單位顯示

不只是測量，更追求精度。能夠掌握、確認根尖穿透的根管長度測量儀「JUSTY 3.5」

搭載高精度測量機能，即使是根管銼針的尖端位置也能測量。搭載「統合補正測量系統」，因結合了兩種頻率而能時時確認整合性。不只能測量隨著根管型態變動的電流值，就連根管銼針的尖端位置也不成問題。

更加正確的測量值從解剖學定義根尖位置1mm內都能以0.1~0.15mm為單位測量，更加正確地測得根管銼針尖端至解剖學定義根尖位置間的距離。

不造成根尖區域負擔不再需要為了決定作業長度而將根管銼針插至解剖學定義根尖位置，加上本機能夠掌握根尖穿透，對於根管治療的精度提升非常有幫助。

## JUSTY 3.5

APICAL LOCATOR

新一代根管長度測量儀

NEW

